

Sonic Alert

Der führende US-Hersteller von optischen Alarmsystemen

Sonic Boom Wecker mit Bettvibration

Modell SBH400ss



BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG -

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, um darauf zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen zu können. Siehe auch Bedienungshinweise auf der Rückseite.

Warnhinweis: Um die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks zu vermeiden, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss gewährleistet sein, dass die am Gerät angegebenen Anforderungen der verfügbaren Stromquelle entsprechen, d. h. 120 V~ 60 Hz oder 230 V~ 50 Hz.

- Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie einer Zeitung, Tüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.
- Auf das Gerät keine Quellen offener Flammen wie z. B. Kerzen stellen.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ausreichende Lüftung stellen.
- Wenn der Netzstecker als Trenngerät verwendet wird, muss das Trenngerät weiterhin betriebsbereit bleiben.



ALLGEMEINE DATEN

Leistungsaufnahme: 120 V ~ 60 Hz, 8 W (USA) ODER 230 V ~ 50 Hz, 8 W (Europa)

Adapterausgang: 9 V ~ 900 mA

Für die USA UL-gelisteter Adapter (Underwriters Laboratories).

Für Europa zugelassener CE-Adapter.

 <p>Der Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, dass Sie auf lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren hinweist.</p>	<p>VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR BITTE KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN! WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGEN AN IHREN SONIC ALERT-KUNDENDIENST.</p>	 <p>Das Ausrufungszeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anweisungen hinweist, die dem Produkt beiliegen.</p>
---	---	--

WARNHINWEIS: UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

1-JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT

Für den Wecker Sonic Boom Modell SBH400ss ist für ein (1) Jahr ab Kaufdatum eine Garantie gegen Herstellungsdefekte bei Materialien und Verarbeitung gewährleistet. Innerhalb dieses Garantiezeitraums wird Sonic Alert den SBH400ss kostenlos reparieren oder nach Sonic Alerts eigenem Ermessen austauschen. Senden Sie den SB400ss einfach (frankiert) mit einer Kopie Ihres Kassenbelegs als Kaufnachweis an: **Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA.**

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der Regelung der Federal Communications Commission. Der Betrieb unterliegt der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Interferenzen verursacht.


Hinweis: Der Hersteller ist für Radio- oder Fernsehinterferenzen jedweder Art, die durch eigenmächtige Modifizierungen an dieser Ausrüstung entstehen, nicht verantwortlich. Solche Modifizierungen können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieser Ausrüstung ungültig machen.

- Bei der Entsorgung der Batterien umweltfreundlich vorgehen.
- Dieses Symbol weist auf eine separate Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte hin.

BEDIENUNGSANLEITUNG
LAUT VIBRIERENDER UHRWECKER MIT BETTVIBRATION
MODELL: SBH400SS

- 1) Lautstärkeregler
- 2) Schlummertaste
- 3) Klangregler
- 4) AM / PM - Anzeige
- 5) Alarmanzeige
- 6) Dimmer
- 7) Alarmausschalttaste
- 8) Zeiteinstelltaste
- 9) Stundeneinstelltaste
- 10) Minuteneinstelltaste
- 11) Alarmeinstelltaste
- 12) Batteriefach
- 13) Funktionsschalter
- 14) Flash-Display
- 15) Eingangsbuchse 9 V Wechselstrom
- 16) Anschlussbuchse für Vibrationsmelder
- 17) Stundenformat und Stromkreisauswahl

Abbildung B

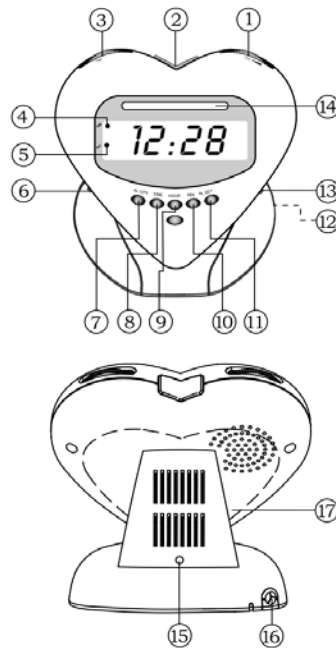

Einstellen der genauen Uhrzeit –

- 1) Halten Sie die Zeiteinstelltaste (8) gedrückt.
- 2) Drücken Sie die Stundentaste (9), um die Uhr vorzustellen, bis die richtige Zeit eingestellt ist.
- 3) Drücken Sie die Minutentaste (10), um die Uhr vorzustellen, bis die richtige Zeit eingestellt ist.
- 4) Sobald die genaue Zeit eingestellt ist, können Sie die Zeiteinstelltaste (8) loslassen.
- 5) Ein leuchtender Punkt (4) links oben im Display zeigt an, dass sich die Uhrzeit auf nachmittags (PM) bezieht, bei der Anzeige von Vormittagsstunden (AM) leuchtet kein Punkt.

Einstellen der Weckzeit –

- 1) Folgen Sie einfach den Anweisungen im Abschnitt „Einstellen der genauen Uhrzeit“, allerdings müssen Sie die Alarめinstelltaste (11) anstelle der Zeiteinstelltaste drücken.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit richtig für vormittags (AM) oder nachmittags (PM) eingestellt wird, ein leuchtender Punkt (4) zeigt nachmittags an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstelltasten für STUNDEN und MINUTEN loslassen, bevor Sie die ALARM-Einstelltaste loslassen.
- 3) Sobald die gewünschte Weckzeit eingestellt ist, können Sie die Alarめinstelltaste (11) loslassen.
- 4) Um die Alarmfunktion einzuschalten, schieben Sie den Funktionsschalter (13) auf die gewünschte Position. Dies schaltet die Alarmfunktion an. Sonst geht der Alarm nicht zur gewünschten Weckzeit los.
- 5) Ein leuchtender Punkt (5) auf der linken Seite des LED-Displays zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist.

Alarm –

Schieben Sie den „FUNKTIONSSCHALTER“ (13) auf die Position Ihrer Weckmethoden, Sie können „VIB“ für den Bettvibrator, „BUZZ“ für Geräusch und „VIB / BUZZ“ für beide auswählen. HINWEIS: Welche Funktion Sie auch für das Aufwecken auswählen, wird die gleiche Funktion für beide Alarme sein. Wenn der Alarm ertönt, werden das Blinklichtdisplay (14) und die Hintergrundbeleuchtung blinken, bis der Alarm angehalten wird.

Schlummereinstellung –

Drücken Sie die SCHLUMMER-Taste (2) nachdem der Alarm ertönt ist. Der Alarm bleibt 9 Minuten lang zum Weiterschlafen ausgeschaltet. Der Alarm wird nach 9 Minuten erneut ertönen.

Alarm abstellen –

Alarm kann für den Tag oder permanent abgestellt werden.

- 1) Wenn der Alarm angeht, drücken Sie einfach die Taste „ALARM AUS“ (7), um für den Rest des Tages abzuschalten. Am nächsten Tag zur selben Zeit geht der Alarm erneut los, wenn die Weckzeit nicht geändert wurde.
- 2) Um den Alarm permanent abzuschalten, schieben Sie den Funktionsschalter (13) auf die Position AUS. Der Alarm geht nicht mehr an bis der Funktionsschalter (13) auf Position „VIB“, „BUZZ“ oder „VIB / BUZZ“ gestellt ist.

Lautstärke –

Um die Lautstärke zu regulieren, drehen Sie den sich auf der oberen rechten Seite (1) befindlichen Regler.

Tonregler –

Steuern Sie den „TONREGLER“ (3), indem Sie den links oben an der Seite befindliche Tonregler (3) drehen. Regeln Sie die gewünschte Tonhöhe von links nach rechts.

Bettvibrator – Siehe Abbildung B

- 1) Schließen Sie den Anschlussstecker des Bettvibrators auf der Rückseite der Uhr an den VIBRATIONSMELDER-Anschluss (16) an.
- 2) Um den Vibrationsalarm auf Alarm zu stellen, schieben Sie den „FUNKTIONS“-Schalter (13) auf VIB oder VIB/BUZZ.
- 3) Legen Sie den Vibrationsmelder unter die Matratze oder ein Kopfkissen.

Notstrombatterie –

Um die Notstrombatterieversorgung zu verwenden, können Sie eine alkalische 9-Volt-Batterie auf der Rückseite der Uhr unter dem Batteriefachdeckel (12) einlegen. Beachten Sie bitte, dass das LED-Display während eines Stromausfalls nicht funktionieren wird, die Uhr läuft jedoch weiter und die genaue Uhrzeit und Alarminstellungen werden speichern, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. HINWEIS: Die Notstrombatterie arbeitet nur für einen kleinen Zeitraum von ungefähr zwei Stunden.

Stromeingang 9V Wechselspannung –

Schließen Sie das Stromkabel in die AC-9V IN Buchse (15) auf der Rückseite der Uhr an, direkt neben dem VIBRATIONSMELDER-Eingang (der kleinere der beiden).

Auswahl von Stundenformat und Stromnetzstärke –

Bitte wählen Sie das Stundenformat und Stromnetzstärke (17) gemäß ihrem Aufenthaltsort. Für die USA wählen Sie 12/60Hz, für Kontinentaleuropa 24/50 Hz und für Großbritannien 12/50Hz.

WICHTIGER HINWEIS: Verwechseln Sie nicht die Stromeingangsbuchse (15) mit dem Vibrationsmeldereingang (16).