



soundshuttle

audio frequency
induction loop systems

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Da das Soundshuttle ab Werk optimal vorkonfiguriert ist, kann es sofort ohne weitere Einstellungen in Betrieb genommen werden.

Laden des Akkus

Der Akku ist ungeladen und muss vor der ersten Nutzung ca. 16 Stunden geladen werden. Nach dem Ladevorgang und auch während des Betriebs kann das Soundshuttle weiter am Stromnetz angeschlossen bleiben, dem Akku schadet dies nicht!

Achtung: Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät. Die Verwendung eines fremden Netzgeräts kann zur Beschädigung des Soundshuttle führen.

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen wurde, ist das Soundshuttle einsatzbereit. Während der Benutzung kann es selbstverständlich auch weiterhin eingesteckt bleiben.

Bedienung

Das Soundshuttle sollte ungefähr einen bis eineinhalb Meter entfernt vom Benutzer aufgestellt werden. Das Mikrofon auf der Rückseite des Geräts muss Richtung Sprecher zeigen.

Normalerweise wird das Soundshuttle stehend benutzt, es kann jedoch auf Wunsch auch liegend betrieben werden. Der Gummifuß auf der Rückseite sorgt dabei für sicheren Halt.

Um das Soundshuttle anzuschalten, betätigen Sie den grünen Knopf auf der Oberseite des Geräts. Zum Ausschalten drücken Sie einfach auf den roten Knopf.

Der Zuhörer muss ein Hörgerät tragen, das eine Telefonspule (=Induktionsspule) besitzt. Diese wird aktiviert, indem das Hörgerät auf die T-Stellung geschaltet wird.

Während der Benutzung des Geräts zeigt das LED auf der Oberseite durch Blinken an, dass die induktive Verstärkung aktiv ist.

Reinigung

Um das Gehäuse des Soundshuttle zu reinigen, wischen Sie dieses mit einem feuchten Tuch und ein wenig Reinigungsmittel ab.

Technische Spezifikationen

Ein technisches Datenblatt mit allen Spezifikationen erhalten Sie auf www.hoerhelfer.de oder auf Anforderung unter info@hoerhelfer.de.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Website des Herstellers unter www.vivid-acoustics.com.

vividTM
ACOUSTICS