


# Vibralite 3TM VIBRATIONSARMBANDUHR

ausgerüstet mit:

- Datum und Uhrzeit ( 12 oder 24 Std. Anzeige)
- zweite Uhrzeit ( für andere Zeitzone)
- Vibrationsalarm
- akustischem PIEP-Alarm
- zwei Weckalarme
- Stundenalarm
- Timer (Medikamenteneinnahme, Kochen, Parkzeit etc.)
- Stoppuhr,
- automatischer Anzeigenbeleuchtung

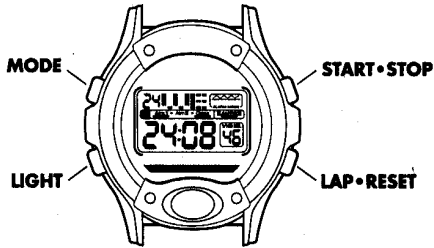

## ALS ERSTES

Drücken Sie MODE, START/STOP UND LAP/RESET gleichzeitig bis die Anzeige erlischt, danach lassen Sie die Tasten los.  
Die Uhrzeit ist nun auf 12 Uhr, das Datum auf Montag (MO) 1. Januar eingestellt.

## Die 6 Funktionen

- 1) Datum und Zeit



- 2) Stoppuhr



- 3) 2. Datum und Zeit



- 4) 1. Alarm



- 5) 2. Alarm



- 6) Timer




## DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie MODE bis zur Datum/Zeitanzeige.



2. Drücken Sie LAP/RESET drei Sekunden lang, die Sekunden blinken. Drücken Sie START/STOP, die Sekunden werden auf 00 gesetzt
3. Drücken Sie MODE, die Stunden blinken. Drücken Sie START/STOP um die Stunden einzustellen.  
Achtung: Wenn Sie die Zeit nachmittags einstellen, muss PM auf der Anzeige erscheinen

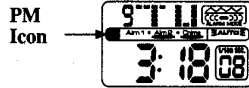

4. Drücken Sie MODE, die Minuten blinken. Drücken Sie START/STOP um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie MODE, 12H blinkt. Drücken Sie START/STOP um auf 24 Stunden-Anzeige zu stellen.
6. Drücken Sie MODE, Datum Tag blinkt. Drücken Sie START/STOP um das Tagesdatum einzustellen.
7. Drücken Sie MODE, Datum Monat blinkt. Drücken Sie START/STOP, um den Monat einzustellen (1-12).
8. Drücken Sie MODE, der Wochentag blinkt (englische Abkürzungen MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).
9. Drücken Sie LAP/RESET, Zeit und Datum sind programmiert.

## WECKALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie MODE bis zur 1.- oder 2. Alarmanzeige



2. Drücken Sie LAP/RESET drei Sekunden lang, die Stunden blinken. Drücken Sie START/STOP um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie MODE, die Minuten blinken. Drücken Sie START/STOP um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie LAP/RESET, die Weckzeit ist programmiert.

Wenn der Alarm 1 gesetzt ist erscheint ein Balken auf der Anzeige, bei Alarm 2 das selbe.

## EIN UND AUSSCHALTEN DES ALARMS

1. Drücken Sie MODE bis zum Alarm-Modus.



2. Drücken Sie START/STOP, die Balken erscheinen oder verschwinden auf der Anzeige.  
Ist ein Balken sichtbar, ist der betreffende Alarm darüber eingeschaltet.

## EIN UND AUSSCHALTEN DES STÜNDLICHEN ALARMS

1. Drücken Sie MODE bis Alarm 1 oder 2 auf der Anzeige erscheint.




2. Drücken Sie mehrmals START/STOP, bis unter CHIME ein Balken in der Anzeige erscheint.  
Um den stündlichen Alarm abzuschalten, drücken Sie START/STOP so oft bis der Balken verschwindet.

## EIN UND AUSSCHALTEN DES VIBRATORS ODER DES AKUSTISCHEN ALARMS

1. Drücken Sie MODE bis zur Zeit/Datumsanzeige.



2. Drücken Sie START/STOP, so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint

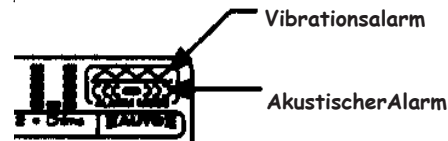

Bei Alarmauslösung vibriert die Uhr für ca 20 Sekunden. Wollen Sie den Alarm früher abschalten, drücken Sie irgendeine Taste.

## DER TIMER


1. Drücken Sie MODE bis zur Timer-Funktion



2. Drücken Sie LAP/RESET 3 Sekunden lang, die Sekunden blinken. Drücken Sie START/STOP, um die Sekunden einzustellen (0-60 S).
3. Drücken Sie MODE, die Stunden blinken. Drücken Sie START/STOP, um die Stunden einzustellen (0-23 Std).
4. Drücken Sie MODE, die Minuten blinken. Drücken Sie START/STOP, um die Minuten (0-59) einzustellen.
5. Drücken Sie LAP/RESET, die Anzeige blinkt nicht mehr.
6. Um den Timer zu starten drücken Sie START/STOP. Wollen Sie den Timer unterbrechen, drücken Sie START/STOP, um ihn wieder zu starten, drücken Sie wieder START/STOP.  
Notiz: Wenn der Timer für mehr als 10 min. eingestellt wurde, erscheint eine kurze Vibration oder Piep 10 min. und 5 min. vor Ablauf der programmierten Zeit.
7. Automatischer Start nach abgelaufener Zeit. Wenn Sie kein Neubeginn des Timers wünschen, drücken Sie die START/STOP Taste zweimal, wenn der Timer schon läuft, einmal wenn er noch nicht aktiviert ist.

## DIE STOPPUHR

1. Drücken Sie MODE, bis die Stoppuhr auf der Anzeige erscheint.

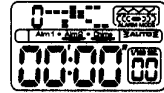

2. Drücken Sie START/STOP um die Stoppuhr zu starten.  
Um die Stoppuhr anzuhalten, drücken Sie START/STOP. Drücken Sie wieder START/STOP die Stoppuhr läuft von dort weiter wo Sie sie angehalten haben.  
Um die Stoppuhr auf 00:00 zu stellen drücken Sie LAP/RESET.

Oder: Drücken Sie START/STOP um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie LAP/RESET, die Uhrzeit läuft weiter, Sie sehen auf der Anzeige die gestoppte Zeit. Drücken Sie wieder LAP/RESET, Sie sehen die laufende Zeit.  
Um die Stoppuhr anzuhalten, drücken Sie START/STOP, und um Sie auf 00:00 zu setzen, drücken Sie LAP/RESET.

## EINSTELLEN DER 2.ZEIT

1. Drücken Sie MODE, bis die 2. Zeitanzeige erscheint.



2. Drücken Sie LAP/RESET drei Sekunden lang, die Stunden blinken. Drücken Sie START/STOP um die Stunden einzustellen.

3. Drücken Sie SET, die Zeit ist eingestellt. Minuten und Sekunden werden automatisch eingestellt, gleich wie bei der Datums-/Zeitanzeige.

## ANZEIGEBELEUCHTUNG

Drücken Sie LIGHT, die Anzeige wird für 3 Sek. beleuchtet. Das Licht leuchtet auf wenn ein Alarm ausgelöst wurde.

## AUTOMATISCHE ANZEIGEBELEUCHTUNG

Drücken Sie LIGHT während 2 Sekunden bis in der Anzeige in der Mitte rechts unter AUTO ein Balken erscheint. Wenn Sie nun den Arm stark schütteln zündet das Licht automatisch an. Zum Ausschalten wieder 2 Sekunden LIGHT drücken bis der Balken verschwindet.  
Achtung diese Funktion braucht viel Batterie!!

## BATTERIE UND SERVICE

Batteriewechsel (Lebensdauer ca 1.5 Jahre) und Service dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. Bringen Sie die Uhr Ihrem Verkäufer oder schicken Sie sie an:

## GARANTIE

Garantie ab Kaufdatum beträgt 2 Jahre. Nicht unter Garantie fallen Schäden die durch unsachgemässe Behandlung entstehen. Die Garantie entfällt wenn die Uhr geöffnet wurde